

RAZOTAJIS: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

SEĐUS STAVOKI PĀRĻICINĒTIETES, KA ROKAS DAĻA AR MANŽETI ATRODAS SĪRDS LĪMENĪ, UN ROKA IR BRĪVĪ NOLĪKTA UZ GALDA UN NEKUSTĒTIES.

PAREIZĀ POZĪCIJA MĒRĪJUMU LAIKĀ (zīm.5)

- Āpsēdieties pie galdā tā, lai asinsspiediena mērīšanas laikā roka balstās uz tā virsmas. Pārliecinieties, ka manšete atrodas aptuveni sirds līmenī un jūsu rokas atrodas brīvi uz galdā, un nekustās.
- Jūs varat izmērit asinsspiedienu gulot uz muguras. Skatīties uz griešiem, nerunājiet un nepārvietojaties mērīšanas laikā. Pārliecinieties, ka manšete atrodas sirds līmenī.

MĒRĪŠANAS PROCEDŪRA

- Levītojiet stetoskopa bināraulā cauruli ausī. Aizveriet spiedējšķūņa gaisa vārstu, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā. Spiežot spiedējšķūni, piesūknējiet manžeti, izklausot pulsu ar stetoskopu. Pēc tam, kad Jūs pārstāsit dzirdēt puls, piesūknējiet manžeti vēl par 30 dz.st. mm.
- Lēnām atverot gaisa vārstu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, pazeminiet spiedienu mērītāzē. Pārliecinieties, ka manžetes spiediens pazeminās ar ātrumu no 2 līdz 4 dz.st. mm sekundē. Tas ir nepieciešams, lai iegūtu precīzu rezultātu.
- Tiklīdz dzirdat vājus pulsa sītenus, iegaumējiet manometra rādījumu. Tas ir jūsu sistoliskais (augšējais) arteriālais asinsspiediens.
- Manžetes spiediens turpina pazemināties tādā pašā ātrumā (2-4 dz.st. mm sekundē). Jūs turpināt dzirdēt puls. Skapas, kuras dzirdat, mainīsies. Atšķirībā no pirmajiem sīteniem, tie kļūs mīkstāki, līdzīgi čabšanai. Brīdī, kad Jūs praktiski nēdzīesiet pulsā, atcerieties manometra rādījumu. Tas ir jūsu diastoliskais (apakšējais) arteriālais asinsspiediens.

KOPŠANA, UZGLBAŠANA, REMONTS UN UTILIZĀCIJA

- Šī ierīce ir jāizsargā pret augsta mitruma, tiešiem saules stariem, triecieniem.
- Ierīci nēglabājiet un nēlietojiet tiešā sildierīcī un atklātas uguns tuvumā.
- Sargājiet manžeti no piesārņojuma.
- Nēpielāpiet ierīces saskarsmi ar agresīviem šķīdumiem.
- Sargājiet manžeti un gumijas caurules no asiem priekšmetiem.
- Ierīce nav aprīkota ar mērījuma precizitātes iestatīšanas ierīcēm. Manometra patstāvīga atvēršana ir aizliegta. Nepieciešamības gadījumā ierīces remontu veiciet tikai specializētās organizācijās.
- Ierīces ekspluatācijas laiks ir norādīts sadaļā GALVENIE TEHNISKE RAKSTUROJUMI. Lietošanas termiņš tiek noteikts no prece nodošanas patērētājam brīža. Pēc noteiktā derīguma termiņa iztecēšanas, ierīces tehniskās stāvokļa pārbaudei ir periodiski jāgriežas pie speciālistiem (specializētās remonta organizācijās).
- Utilizējot vadītienes no pašreiz Jūsu reģionā spēkā esošajām noteikumiem. Ražotājs šai ierīcai nav noteicis speciālus utilizācijas apstākļus.
- Manžete ir noturīga pret daudzkārtīgu sanitāro apstrādi. Ir ielaujama manžetes iekšējā auduma seguma (kas kontaktē ar pacienta roku) apstrāde ar vates tamponu, kas samitrināts 3% ūdeņarā pārskaņēs šķīdumā. Ilgstoti lietojot, ir ielaujama daļēja manžetes auduma sega ma izbalēšana. Nav ielaujama manžetes mazgāšana, kā arī apstrāde ar karstu gludekli.

GARANTIJAS SAISTĪBAS

Iegādājātai ierīcei tiek nodrošināta 24 mēnešu garantija no pārdošanas datuma. Garantijas termiņš manšetei un sūkņim ir 12 mēneši no pārdošanas datuma. Garantijas saistības aplicina garantijas talons, ko noformē, pārdodot ierīci pircējam. Darības traucējums, kas konstatēti garantijas termiņa laikā, tiks novērsti specializētā servisa centrā bez maksas 21 darba dienas laikā pēc ierīces nodošanas servisa centram. Būjātās ierīces transportēšanas izmaksas sedz Little Doctor Europe Sp. z o.o. (apakojums "door-to-door"), izņemot traucējumus, uz kuriem garantija neattiecas. Puse, kas iesniedz pretenziju, ir paretzi jāsgatavo ierīce nosūtīšanai, pasargājot to no bojājumiem transportēšanas laikā, un jāiekļauj aizpildīts garantijas talons (ar pārdevēja zīmogu, pārdošanas datumu un pārdevēja parakstu) un pirkuma aplicinājums (rēķins-faktūra vai čeks). Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepietiekamas aizsardzības dēļ transportēšanas laikā. Garantijas termiņš tiek pagarināts par ierīces remonta laiku. Pēc garantijas termiņa beigām ierīces remonts tiek veikts par lietotāja līdžekļiem.Garantija neattiecas uz: individuālā lietošanā paredzētiem materiāliem un piederumiem (caurules, smidzinātāji, maskas, uzgali utt.); precēm, kurām ir mehāniski, termiski vai ķīmiski bojājumi, vai bojājumi, kas radušies lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ; precēm, kurām ir modifikācijas, atvēršanas u/vai remonta pazīmes neautorizētā servisa centrā (pie privātpersonas); precēm, kas tika pieslēgtas pie neietiecāmām barošanas avotiem vai izmantotas kopā ar neietekmītiem materiāliem; precēm, kuras tika lietotas ar neizlabotiem defektiem; precēm, kurām ir defekti, kuri nav radušies ražošanā vaiņas dēļ, bet kuras ir izraisījušas, piemēram, trešo personu darbības, dabas parādības un stihiskas nelaimes, dzīvnieki, insekti, svētkermeņi vai šķīdumu nokļūšana ierīces iekšēnē u.c.; iekšējām un ārējām piesārņojumiem, skrāpējumiem, plaisām un citiem ierīces mehāniskiem bojājumiem, kas rodas ierīces lietošanas laikā; precēm, kurām ir nesadalās vai izmainīts sērijas numurs, kā arī bojāta garantijas plomba; barošanas elementiem, stikla detaļām, spuldzēm, kā arī tādiem darbu veidiem kā regulēšana, tīrīšana un cita preces kopšana. Pircējam ir jābūt īpašas noamint ierīci pret jaunu ierīci č bez defektiem, ja autorizētās serviss atklāj ražošanas defektu, kuru nav iespējams novērst, vai pēc 3 neievksmīgiem viena un tā paša defekta labošanas mēģinājumiem.

TEHNISKE RAKSTUROJUMI

Spiiediena mērīšanas diapazons, dz.st. mm	no 0 līdz 300 (spiediēns manžetē)
Indikācijas diapazons, dz.st. mm	no 0 līdz 300
Ielējamajs absolūtās kļūdas robežas, mērot spiedienu manžetē, dz.st. mm	±3
Ierīces ekspluatācijas apstākļi: Apkārtējā gaisa temperatūra, °C Mitrums, % Rh	no 10 līdz 40 ne vairāk kā 85
Ierīces uzglabāšanas un transportēšanas noteikumi: Apkārtējā gaisa temperatūra, °C Mitrums, % Rh	no minus 34 līdz 65 ne vairāk 85
Ierīces svārs (bez iepakojuma un maisa), g: modelis LD-70 / LD-70NR modelis LD-71, LD-71A modelis LD-60 / LD-61 modelis LD-80 modelis LD-100	270/240 330 360/310 330 480
Gabaritizmēri (patēriņa iepakojums), mm modelis LD-60, LD-61, LD-70, LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80 modelis LD-100	115 x 185 x 75 173 x 135 x 140
Ražošanas gads	Ražošanas gads un mēnesis ir norādīti manometra apkāšējā daļā, sērijas numurā aiz buratām «A».

MANŽETU UN IERĪCU IZMĒRI:

modelis LD-70 modelis LD-71 modelis LD-71A modelis LD-100 modelis LD-61 modelis LD-70NR	pieaugušajiem	pleca apkārtmēram no 25 līdz 36 cm
modelis LD-60	pieaugušajiem, liels jaundzimušajiem zīdaiņiem bērnēm	pleca apkārtmēram no 33 līdz 46 cm pleca apkārtmēram no 7 līdz 12 cm pleca apkārtmēram no 11 līdz 19 cm pleca apkārtmēram no 18 līdz 26 cm

SIMBOLU ATŠĪFRĒJUMS:

CE 0123 Atbilstība Direktīvai MDD 93/42/EEC

SVariņš: Iztēsošanās pamācību

EU REEP Pirmavotais pārstāvis

Ražotājs

Ukrainas atbilstības zīme

Ražošanas datums

Sargāt no mitruma

Glabāšana, transportēšanas un lietošanas noteikumi

Sērijas numurs

Medicīniskā piemone

Unikalus prietaiso identifikatoris

Importētājs

Šis ierīces ražošanā ir sertificēta saskaņā ar starptautisko standartu ISO 13485. Ierīce atbilst Eiropas Direktīvas MDD 93/42/EEC prasībām. Jebkāds noņemts ar ierīci saistīts negadījums būtu jāpāzino ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs veic uzņēmējdarbību un/vai dzīvo pacientis. Šis rokasgrāmatas pārskatīšanas datums ir norādīts piedāvē lapappē kā XX-XXXX-YYMM-NN, kur YY ir gads, MM ir mēnesis, un NN ir pārskata numurs.

INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU, PILNVAROTU PĀRSTĀVU UN IMPORTĒTĀJU

Kontrolētais ražotājs

Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591.

Pasta adrese: 3 Coleman Street #03-24 Singapore 179804).

Ražotājs: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

EU REEP Little Doctor Europe Sp. z o.o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, telefoni: +48 12 2684746, 12 2684747, faks: +48 12 268 47 53, e-pasts: biuro@littledoctor.pl)

Little Doctor Europe Sp. z o.o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland),
 Detalizēta informācija mājlapā: www.littledoctor.sg

PAPILDUS PIEDERUMI

Papildus esošajām manžetēm papildus iegādēji ir pieejamas šāda izmēra LD-Cuff manžetes:

Nosaukums / Izmērs	Rokas apkārtmērs, cm	Materiāls	Pneimokam- era
C2N / jaundzimušajiem	7-12	kokvilna	LD-S02N
C2I / zīdaiņiem	11-19	kokvilna	LD-S02I
C2C / dētskij N2C / dētskij	18-26	kokvilna neilons	LD-S02C
C2A / bērnu N2A / bērnu	25-40	kokvilna neilons	LD-S02A
C2L / pieaugušo	34-51	kokvilna	LD-S02L
C2T / pieaugušo, liels	40-66	kokvilna	LD-S02T
N2AR / bērnu	25-36	neilons	LD-S02A
N2LR / pieaugušo	33-46	neilons	LD-S02L

* Manžetes metāla fiksācijas gredzens patstāvīgas manžetes uzvilkšanas ērtumam.

EST

SEADME PEAMISED OSAD (joonisēd.1)			Arv									
№	Osa nimenus	Komplekt	LD-60		LD-61	LD-70	LD-70NR	LD-71	LD-71A	LD-80	LD-100	
1	Manomeeter	Manomeeter LD-S013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Manomeeter	Manomeeter LD-S048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Mansett taiskasvanutele rõngaga	Mansett N2AR Pneumokamber LD-S02A	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
	Mansett taiskasvanutele	Mansett N2A Pneumokamber LD-S02A	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	Mansett suur taiskasvanutele rõngaga	Mansett N2LR Pneumokamber LD-S02L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Laste mansett	Mansett C2C Pneumokamber LD-S02C	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Vastsündinu mansett	Mansett C2N Pneumokamber LD-S02N	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Beebi mansett	Mansett C2I Pneumokamber LD-S02I	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
4	Stetoskoop peaga sisseehitatud mansetti	LD Prof-Plus (peaga LD-S025a)	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
	Stetoskoop	LD Prof-Plus (peaga LD-S025)	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
5	Puhur kokkupanekul	Puhur LD-S014 Ohukülap LD-S015 Tagasivoolukülap LD-S016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Kott	Kott LD-S059	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Kasutusjuhend ja garantiitaolng	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	